



## Eerste hulp bij oogletsel

Soort letsel	Aanbevolen spoelmiddel	Aanbevolen behandeling
Vervuiling van het oog door stof, vuil, metaal- of houtsplinters.	Oogspoelmiddel zoutoplossing	Spoel gedurende minstens vijf minuten tot al het vuil uit het oog is
Schade door zuren en logen	Oogspoelmiddel PH-neutraal	Neutraliseer met PH-neutraal spoelmiddel, spoel na met steriele zoutoplossing
Letsel door andere schadelijke stoffen	Oogspoelmiddel zoutoplossing	Spoel gedurende minstens vijf minuten tot al het vuil uit het oog is
Schade door zuren, logen of chemicaliën op de huid	Oogspoelmiddel PH-neutraal	Spoel de aangetaste huid tot er geen onprettig gevoel meer is.

Raadpleeg bij oogletsel altijd een arts!  
Blijf indien mogelijk onderweg naar de arts ook spoelen.



Oogspoelmiddel zoutoplossing  
Verkrijgbaar in 250 ml en 500 ml.

600.MX.9503 Oogspoelmiddel  
steriele zoutoplossing 500 ml  
600.MX.9504 Oogspoelmiddel  
steriele zoutoplossing 250 ml



Oogspoelmiddel PH-neutraal  
Verkrijgbaar in 250 ml.

600.MX.9510 Oogspoelmiddel  
PH-neutrale oplossing 250 ml

